

# CELOX<sup>TM</sup> ПОВЯЗКА Z-ФОЛД

## Повязка Селокс (Z-сложенный бинт Селокс)



Повязка Селокс – это продукт в линейке Селокс, разработанный для специальных служб.

Плоская, легкая упаковка занимает мало места в упаковке и удобна для применения в боевых условиях.


Вес одной упаковки Z-сложенной повязки Селокс всего 34 г, что очень важно для бойцов спецподразделений.

**Z-сложенная повязка Селокс, как и классический бинт Селокс, подходит для:**


- сильных кровотечений с высоким давлением;
- огнестрельных, осколочных и ножевых ранений;
- перевязки ран;
- остановки кровотечений при открытых переломах.

### Как использовать

Начинается кровотечение

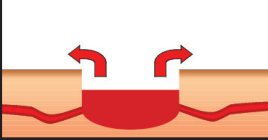

Этап 1: По возможности удалите кровь из раневой поверхности

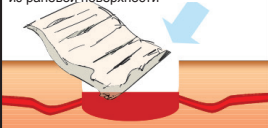

Этап 2: Плотнo затампонируйте рану повязкой Селокс



Этап 3: Прижимайте в течение 3-х минут



Этап 4: Наложите стерильную повязку по возможности



### Размеры упаковки

138 x 115 x 20 мм,  
размер повязки: 1500 x 75 мм  
8 г гранул Селокс  
на поверхности повязки

### ПРОСТ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ



Специалисты утверждают, что Z-сложенная повязка Селокс более удобна в применении.

Останавливает кровотечение  
**СПАСАЕТ ЖИЗНЬ**