

FOXSEAL™

Герметик, которому можно доверять...



Инструкция по применению

1. Удалить кровь и влагу вокруг раны.
2. Снять защитную пленку герметика для пневмоторакса.
3. Наложить герметик липкой стороной на рану. Желательно при выдохе пострадавшего.
4. Плотно надавите на пластину вокруг раны.
5. При наличии других ранений, повторить шаги с 1 по 4, используя вторую пластину.
6. Использовать ярлычок для вентилирования и повторного наклеивания при необходимости.

Contact us at www.biostatllc.com | 407.252.6758
[facebook.com/tactical.biostat](https://www.facebook.com/tactical.biostat)

